

# Instructiekaart

# Flessensysteem



Deze instructie is geschreven voor 2 liter flessen.

## Basis regels gebruik fles

- 1 Spoel de instrumenten conform WIP richtlijnen.
- 2 Voeg bij elke vulling Metasys WK toe aan de inhoud van de fles.
- 3 Leeg aan het einde van de werkdag altijd de fles en droog deze omgekeerd.
- 4 Zet aan het einde van de werkweek of bij langdurige stilstand altijd de leidingen volledig droog.
- 5 Voer wekelijks een shock behandeling uit.


## Uw heeft verhoogde bacteriologische waardes.

- 1 Voer een dagelijkse shock behandeling uit gedurende 5 dagen.
- 2 Voer wederom een meting uit.
- 3 Herhaal dit proces tot de bacteriologische waardes acceptabel zijn.

## Doorspoelen instrumentslangen

Kort programma tussen de behandeling, lang programma aan het begin & einde van de werkdag.

- 1 Verwijder alle hand en hoekstukken.
- 2 Plaats de spoleenheid in het spittoon of emmer.
- 3 Plaats **alle** instrumentslangen behalve de meerfunctiespuit in de spoleenheid.
- 4 Houd toets **5** ingedrukt tot er 2 korte pieptonen geweest zijn en het spoelprogramma begint.
- 5 Laat de slangen gedurende **20 tot 40 seconden** doorspoelen.
- 6 Stop nu het spoelprogramma door toets **5** te selecteren.

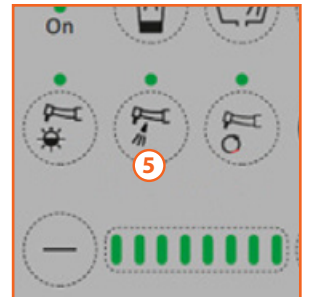

**Let op:** Het doorspoelen van de meerfunctiespuit dient handmatig te gebeuren.

**Let op:** Het spoelprogramma stopt niet automatisch. Blijf dus te alle tijden bij de unit bij het uitvoeren van dit programma.

## Flessen vullen

- 1 Zet de schakelaar op de unit om, op deze manier haalt u de druk van de fles.
- 2 Koppel met een draaibeweging de fles af.
- 3 Vul met **24 ml. Metasys Green & Clean WK**.
- 4 Vul de fles met (demi)water.
- 5 Sluit de fles weer aan en zet de schakelaar om.



# Instructiekaart

# Flessensysteem



## Leidingen droogzetten

- 1 Haal de luchtdruk van de fles.
- 2 Haal de fles van de unit en giet deze helemaal leeg.
- 3 Plaats de fles terug op de unit en zet onder druk.
- 4 Spuit nu de functiespuit helemaal leeg tot er 10 seconden enkel nog lucht uit komt **(met het waterknopje!!!)**.
- 5 Activeer het spoelprogramma voor de overige instrumenten tot er 10 seconden enkel nog lucht uit komt.

## Shock behandeling

- 1 Zet de leidingen droog.
- 2 Haal de luchtdruk van de fles en haal de fles van de unit.
- 3 Vul de fles met **24 ml. Metasys Green & Clean WK** en vul verder met (demi)water (het is natuurlijk ook mogelijk op 24ml WK te gebruiken i.c.m. 50% flesvulling of 12ml WK met 25% flesvulling).
- 4 Plaats de fles terug op de unit en zet onder druk.
- 5 Spuit nu met de functiespuit tot er 2 seconden lang een goede spray is.
- 6 Activeer nu het spoelprogramma en wacht tot er 2 seconden uit alle instrumenten vloeistof komt.
- 7 De unit kan nu eventueel uit gezet worden. Laat de oplossing minimaal 1 uur inwerken en maximaal 12 uur.



### Metasys Green & Clean WK producten:

- |                                                                                |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 Green & Clean WK doseerkit (voor 750 ml. fles)<br>Bestelnummer: 035-40200020 | 2 Green & Clean WK (4 x 750 ml.)<br>Bestelnummer: 035-60040100-1 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|



Het complete assortiment aan onderhoudsproducten van Metasys kunt u bestellen via onze webshop: [www.e-dental.nl](http://www.e-dental.nl)

# Instructiekaart


# Flessensysteem



## Zelf testen

Met een 3M Petrifilm™ Aerobic Count Plate

- 1 Vul een plastic wegwerp beker voor 50 % met water uit de meerfunctiespuit.
- 2 Meng het water met lichte draaibewegingen.
- 3 Giet het water in wasbak of spittoon.
- 4 Vul de wegwerp beker nogmaals voor 50 % met water uit de meerfunctiespuit.
- 5 Vul de 3cc spuit volledig met water uit de wegwerp beker.
- 6 Spuit de spuit leeg in wasbak of spittoon.
- 7 Herhaal dit proces 2 x  
(Spoelen is noodzakelijk om eventuele verontreinigingen aan beker en spuit te verwijderen).
- 8 Vul de spuit nu met **1cc** water uit de wegwerp beker.
- 9 Klap de **3M Petrifilm™ Aerobic Count Plate** open  
(**LET OP** de nu blootgelegde voedingsbodem niet aanraken, vanwege besmetting via vingers).
- 10 Spuit de inhoud (1cc) van de spuit rustig leeg in het midden van de **3M Petrifilm™ Aerobic Count Plate**.
- 11 Klap dicht zonder de binnenzijdes aan te raken  
(**LET OP** de nu blootgelegde voedingsbodem niet aanraken, vanwege besmetting via vingers).
- 12 Leg de **3M Petrifilm spreader** (met de opstaande rand naar beneden) in het midden van de watermassa. Vervolgens druk subtiel op de spreader om het water gelijkmatig (cirkelvormig) te verdelen.
- 13 Bewaar de **3M Petrifilm™ Aerobic Count Plate** op een droge plek op kamertemperatuur. Wacht gedurende 5 tot 6 dagen.

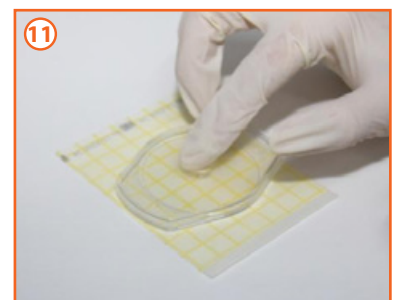

# Instructiekaart

# Flessensysteem




## Beoordeling


Met een 3M Petrifilm™ Aerobic Count Plate.

In deze instructiekaart behandelen wij kort de mogelijke scenario's welk u aan kunt treffen.

Op de bovenste foto kunt u gemakkelijk het aantal kolonie vormende eenheden tellen. Elke rode stip vertegenwoordigd 1 kve. Dit voorbeeld betreft een watertest < 100 kve/ml.

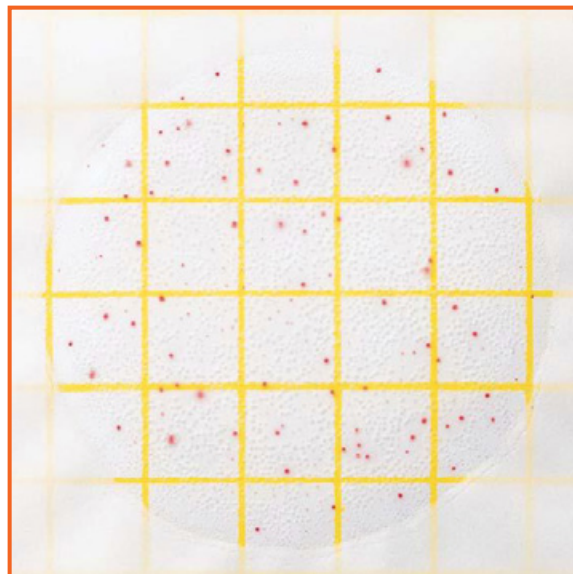

Op de onderste foto betreft een watertest met significant aantal bacteriën (kve) per ml die in het geteste spraywater zitten. Deze uitslag van de watertest vertoont een ronde paars / roze cirkel. Wanneer dit het geval is, zullen naar schatting  $10^5$ - $10^6$  kve/ml.

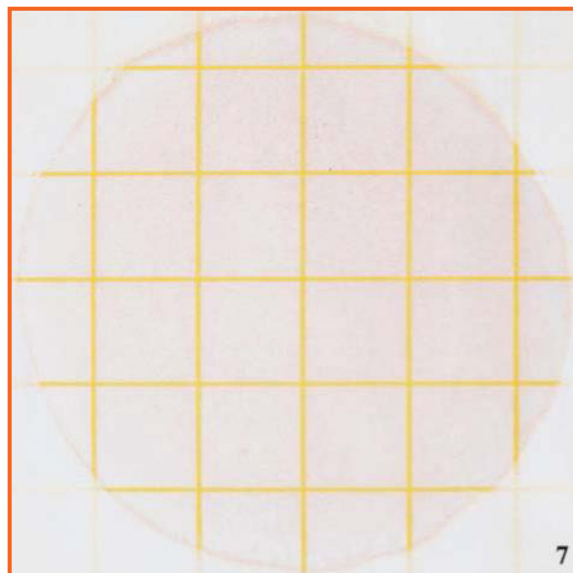

## Registratie

Het is van belang dat de resultaten van de door u uitgevoerde tests worden bijgehouden. Een voorbeeld formulier hiervoor kunt u bij ons aanvragen.