

Instructiekaart

FireCR Fosfor Scanner



Vorbereiding opname

- Plaats de Protective Cover (kartonnen bescherming) over de (blauwe) fosfor zijde van de Image plate. (de oranje kant bedekt de blauwe kant)
- Plaats de Image Plate met Protective Cover in het hygiënezakje, met de tekst "FireCR" achter de tekst "Opposite side to X-ray Tube", zoals op afbeelding 1.
- Verwijder het gele schutvel en plak het hygiënezakje dicht met de zelfklevende strip.
- Plaats de Image Plate met hygiënezakje in het richtset, zoals op afbeelding 2.
- De intraorale röntgenbuis straalt tegen de volledig **zwarte** kant van het hygiënezakje (en daarmee de **blauwe** kant van het fosfor plaatje).



LET OP:

Een fosforplaatje wordt onder invloed van licht automatisch gewist. Hoe langer het plaatje aan licht wordt blootgesteld des te meer informatie er verloren gaat. Zorg dus voor het uitpakken en op de tray leggen van het fosforplaatje op de tray altijd dat de FireCR klaar staat om te scannen.



Scannen

- 1 Activeer de juiste patient binnen uw rontgensoftware en activeer de FireCR.
 - Op het display verschijnt een blauwe pijl boven de lade, dit betekent dat de FireCR klaar staat om te scannen.
- 2 Scheur het Hygiene zakje open.
- 3 Leg de Image Plate met de blauwe zijde naar boven tegen de rand van de lade.
- 4 Op het display verschijnen twee blauwe pijlen.
- 5 Verwijder de Protective Cover (kartonnen bescherming) en druk met twee vingers de lade volledig dicht
- 6 De fosforplaat wordt nu automatisch uitgelezen en erna gewist.

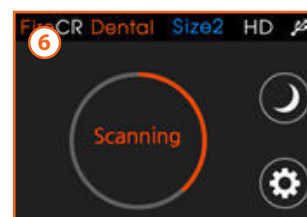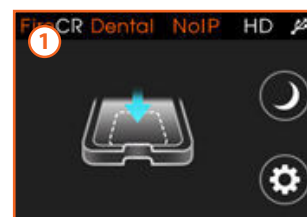

Hoe de fosforplaat neer te leggen



Twain interface

Uitleg verbinding

In een situatie waarin de FireCR via het netwerk is aangesloten en via meerdere werkplekken aangestuurd kan worden moet bij het activeren van de het TWAIN opname venster op "Connect" gedrukt worden.

Slechts 1 werkplek kan verbinding maken met de scanner. Wanneer een andere werkplek verbinding heeft gemaakt zal deze eerst verbroken, "Disconnect" moeten worden.




Uitleg beelden terug halen

De FireCR slaat automatisch de laatste 100 beelden op om nadien terug te kunnen halen volg hiervoor de volgende procedure:

- Start het TWAIN opname venster

- 1 Selecteer opslag
- 2 Klik op de gewenste opname (het beeld wordt nu ingelezen)
- 3 Bevestig dat dit het juiste beeld is (bij meerdere afbeeldingen stap 2 en 3 herhalen)
- 4 Sluit dit venster
- 5 Bevestig het binnenhalen

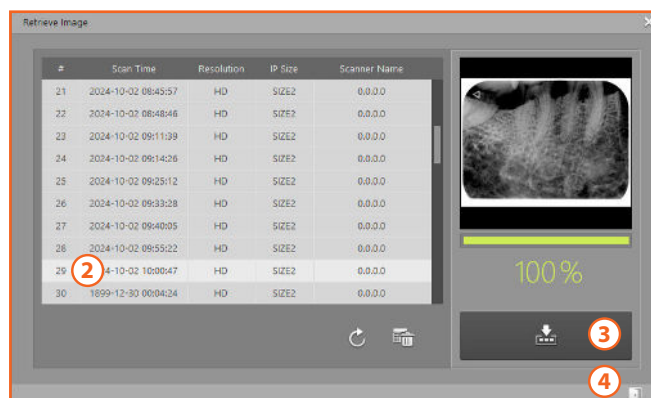

Het complete assortiment aan verbruiksartikelen voor de FireCR Fosfor Scanner kunt u bestellen via onze webshop: www.e-dental.nl