

Bedieningspaneel behandelaar

- 1 Indicatie
- 2 Glasvuller
- 3 Rondspoeling spittoon
- 4 Operatielamp aan / uit
- 5 Instrument spray aan / uit
- 6 Omkeren draairichting micromotor
- 7 Automatische chip-blow aan / uit
- 8 Instrument spoelsysteem activeren
- 9 Handmatige snelheid micromotor
- 10 Instrumentlicht aan / uit
- 11 Programmeertoets
- 12 Stoelbediening



Toetsenpaneel



Touchscreen



Instellen spittoon & glasvuller

- 1 Druk op de glasvuller **2** of de rondspoeling toets **3** en houd deze ingedrukt (een pieptoon volgt).
- 2 Wanneer de gewenste hoeveelheid is bereikt laat u de toets los (een pieptoon volgt).
- 4 De instelling is automatisch opgeslagen.

Instellen spray

- 1 Activeer het betreffende instrument door de zweep naar voren te trekken
- 2 Druk op de programmeertoets **11** en druk binnen 5 seconden op de spraytoets **5**
- 3 Stel nu met **+** of **-** de gewenste spray hoeveelheid in (af te lezen op **1**)
- 4 Druk nogmaals op de programmeertoets **11** om op te slaan

Voetpedaal

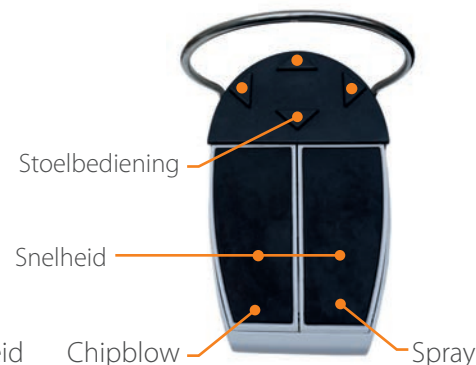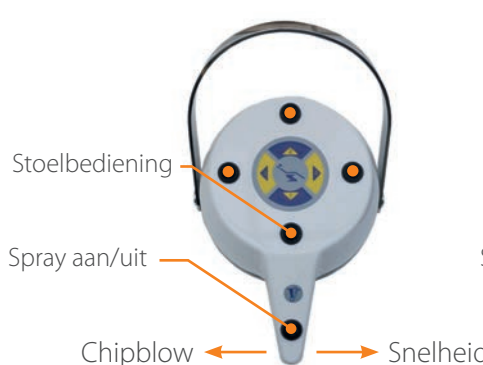

Stoelbediening

Zowel mogelijk via voetpedaal als bedieningspaneel

- Kort indrukken activeert één van de vier geprogrammeerde stoelposities
- Lang indrukken drukken bepaald handmatig de stoelpositie

Stoelprogrammering

- 1 Zet de stoel in de gewenste positie
- 2 Houdt de zwarte knop aan de onderkant van de rugleuning ingedrukt
- 3 Druk nu op één van de vier stoelbedieningsknoppen **12**
- 4 De stoel bevestigt de instelling met een pieptoon

Doorspoelen instrumentslangen


Kort programma tussen de behandeling, lang programma aan het begin & einde van de werkdag

- 1 Plaats de spoleenheid in het spittoon of emmer
- 2 Plaats de instrumentslangen (zonder instrumenten) in de spoel-eenheid (minimaal 2)
- 3 Druk op de doorspoeltoets **8** op het instrumentenpaneel
 - 1 seconden ingedrukt houden activeert het korte programma
 - 4 seconden ingedrukt houden activeert het lange programma
- 4 **Let op:** Het doorspoelen van de meerfunctiespuit dient **handmatig** te gebeuren gedurende minimaal 30 seconden bij het korte programma en minimaal 60 seconden bij het lange programma



Reinigen afzuigsysteem (middag en avond)


- 1 Druk twee maal op de dispenserpomp (= 6 ml concentraat)
- 2 Vul het reservoir met water tot aan de niveaustreep (600 ml water)
- 3 Zet de kleine afzuiger tegen opening nr. 1 totdat er geen vloeistof meer wordt opgezogen (200 ml)
- 4 Zet de grote afzuiger tegen opening nr. 2 totdat er geen vloeistof meer wordt opgezogen (200 ml)
- 5 Giet de resterende vloeistof in het spittoon

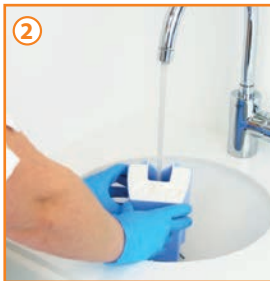

Voor spoelen tussen de behandelingen door slaat u stap 1 over.

Reinigen afzuigfilter (dagelijks)

- 1 Haal beide afzuigers uit de houders gedurende 5 seconden en plaats deze vervolgens weer terug
- 2 Verwijder het filter uit de behuizing door deze naar u toe te trekken
- 3 Reinig het filter grondig en plaats alles terug

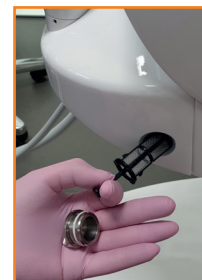

De locatie van het filter verschilt per model

Reinigen filter spittoonklep (wekelijks)

- 1 Activeer Dürr leegzuiging d.m.v. bediening op de zijkant van de unit
- 2 Verwijder het filterhuis d.m.v. een draaibeweging
- 3 Reinig het filter grondig
- 4 Plaats alles terug



De locatie van het filter verschilt per model

Reinigen spittoon (dagelijks)

- 1 Keer de doseerfles ondersteboven en knijp één maal
- 2 Reinig het spittoon grondig met de geïntegreerde borstel
- 3 Activeer de spoelfunctie van het spittoon **3**



Sterisil cartridge spraywater desinfectiesysteem

Controle werkzaamheid (wekelijks)

- 1 Vul een plastic wegwerpbeker voor 50 % met water uit de meerfunctiespuit
- 2 Houdt de TDS meter in de plastic wegwerpbeker tot aan de streep.
- 3 Druk op de knop "hold"
- 4 Wanneer de waarde groter is dan 10 ppm zult u uw cartridge op korte termijn moeten vervangen



Vervangen cartridge

- 1 Draai de oude cartridge uit de houder
- 2 Plaats een nieuwe cartridge terug
- 3 **Volg vervolgens de stappen conform de gebruiksaanwijzing van de cartridge**



De locatie van de cartridge verschilt per model

LET OP

Bij het reinigen van de unit dient men er rekening mee te houden dat er geen vloeistoffen in de unit komen, dit kan schade aan inwendige (elektrische) componenten veroorzaken

Productadvies t.b.v. reiniging van de complete unit



Verbruiksartikelen (bestel op www.e-dental.nl/chiranaeasy)

Afzuiging

105-7600A01000	Dürr Nevelafzuiger met schuifje
105-7600A01004	Dürr Verloop 16mm voor Nevel Afzuiger
105-7600A02000	Dürr speekselzuiger met schuifje
105-7600A03000	Dürr kogelgewricht voor Nevelafzuiger
105-72504100	Dürr Filter geel
140-041055	Cattani, Ronde filter 1130

Waterbehandeling

240-TDS-3	Electronische water hardheid meter (in PPM)
240-CV-10EUP	Sterisil Cartridge CV-10 EU Dental 3-pack
240-CV-20EUP	Sterisil Cartridge CV-20 EU Dental 3 Pack
240-CS-50-B	Citrisil Blue tablet (48) & Shock tablet (2) voor 0,7 l fles

Behandelstoel

210-1095135	Tecnodent Linda3 & 2009 new transparent footrest protection
095-220250	Chirana, SK1 voeten hoes

Instrumenten

055-RL348G-	Luzzani Minimate gray nozzle (PN 348)
055-RT223	Minimate Steel nozzle cover (PN 441)
020-0113528100	Bien Air MC3, MC2, Aquil, O-RING INTRA
095-221087	Chirana CH660 O-ring neus 8,25x0,73
125-200150	Riskontrol adapter RVS Luzzani NEW
125-201664	Satelec Riskontrol Classic Tips "White" 250 stuks

Hygiëne

035-60030095	Green & Clean MT/MK refill kit I (2 x 70 large wipes)
035-60030111	Green & Clean SK intro kit (6 x 750 ml fles + 2 x foamer)
035-60030002	Green & Clean SD refill kit 1 (6 x 750 ml fles)
035-60030095	Green & Clean MT/MK refill kit I (2 x 70 large wipes)
035-60010203	Green & Clean M2 refill kit II (2 x 500 ml flessen)
035-40200001BL	Dispenser for Green & Clean M2
035-60020009	Green & Clean MB replacement fles met brush, empty
035-60020004	Green & Clean MB refill kit 2 (4 x 500 ml)

Deze instructiekaart heeft betrekking op onderstaande modellen

