

Instructiekaart Hybrid 5 /2 afzuigsysteem



Kelvinring 5
2952 BG Alblasserdam
Nederland

Algemeen

T +31 (0)88 6060800

E info@e-dental.nl

I www.e-dental.nl

Technische Dienst

T +31 (0)88 6060820

E service@e-dental.nl

Uw afzuigsysteem is het systeem vanaf afzuigcanule tot en met afzuigmotor. Voor optimaal functioneren is het van groot belang zowel de dagelijkse acties aan de stoel als de wekelijkse acties bij de afzuigmotor correct uit te voeren.


Dagelijkse acties (stoel)

1. Volg Instructiekaart Green&Clean M2 of CL

Wekelijkse acties (afzuigmotor)

1. Schakel de motor uit
2. Verwijder het (gele) aanzuigfilter
3. Controleer het filterhuis op verontreinig
→ **bel E Dental bij verontreiniging**
4. Reinig het (gele) aanzuigfilter en plaats dit terug
5. Controleer de overflow slangen
→ **bel E Dental wanneer deze vocht bevatten**
6. Schakel de motor aan

Aan / Uit schakelaar
0 = Uit 1 = aan

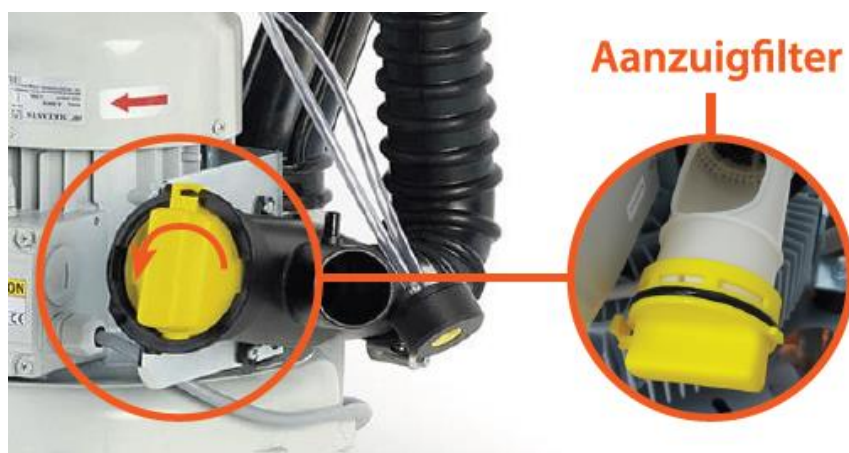

GREEN&CLEAN M2

Toepassing



1. Druk het pompje van de dispenser tweemaal in (= 6 ml concentraat)



2. Vul de container met koud water tot aan de indicator (=600 ml van 1% verdunning)



3. Zet de kleine afzuigslang tegen opening nr. 1 totdat de lucht is opgezogen (200 ml)



4. Zet de grote afzuigslang tegen opening nr. 2 totdat de lucht is opgezogen (200 ml)



5. Giet de resterende oplossing in de spitoon (200 ml)



6. Houd de toepassingstijd van 60 min. aan en spoel vervolgens met koud water

Antischuimconcentraat met dubbele actieve werking voor de desinfectie en ontgeuring van afzuigsystemen en amalgaamscheiders

Kenmerken

dubbele werking (rood/groen) tegen weerstand
bacteriedodend, tuberculosebacteriedodend, schimmeldodend (C. albicans), HBV/HIV/HCV
zeer geconcentreerd en eenvoudig te doseren
uitstekend ontgeurings- en eiwitoplossend vermogen
actieve ontschuiming
getest conform EN-standaarden en VAH-richtlijnen

Aanbevelingen voor gebruik

2 x dagelijks (s middags/'s avonds) en na lange chirurgische behandelingen
Reinig het afzuigstelsel na iedere behandeling met koud water
Verander van kleur na 83 toepassingen (1 fles)
Draag beschermende handschoenen tijdens het desinfecteren
Volg de doseeraanwijzingen en aanbevolen toepassingstijden nauwkeurig op
Gebruik de mengoplossing onmiddellijk
Neem de gebruiksinstructies van de fabrikant in acht

De dispenser opnieuw vullen



Verwijder de doseerunit van de dispenser en verwijder de kop van het pompje door deze naar links (tegen de wijzers van de klok) in te draaien



Schenk de nieuwe GREEN&CLEAN M2 in de container (500 ml)



Bevestig de kop weer op de container door hem naar rechts te draaien (met de wijzers van de klok mee) en plaats de doseerunit weer terug in de dispenser



Bestelnummers

- 035-60010201 Introkit, 2 x 500 ml flessen (1 x rood, 1 x groen) + dispenser
- 035-60010202 Navulbare kit 1, 4 x 500 ml flessen (2 x rood, 2 x groen)
- 035-60010203 Navulbare kit 2, 2 x 500 ml flessen (1 x rood, 1 x groen)
- 035-60010204 GREEN&CLEAN M2 rood, 25 x 500 ml flessen
- 035-60010205 GREEN&CLEAN M2 groen, 25 x 500 ml flessen
- 035-40200001 BL Dispenser voor GREEN&CLEAN M2
- 035-40200002 Upgradekit voor dispenser voor 3 afzuigslangen