


# Instructiekaart

## Qdent Focus Unit



### Bedieningspanelen

- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1 Glasvuller               | 8 Snelheid / intensiteit indicatie |
| 2 Rondspoeling spittoon    | 9 Stoelbediening                   |
| 3 Operatielamp aan/uit     | 10 Spoelstand                      |
| 4 Instrument licht aan/uit | 11 Uitstapstand                    |
| 5 Instrument spray aan/uit | 12 Instellen spray                 |
| 6 Draairichting micromotor |                                    |
| 7 Optioneel                |                                    |

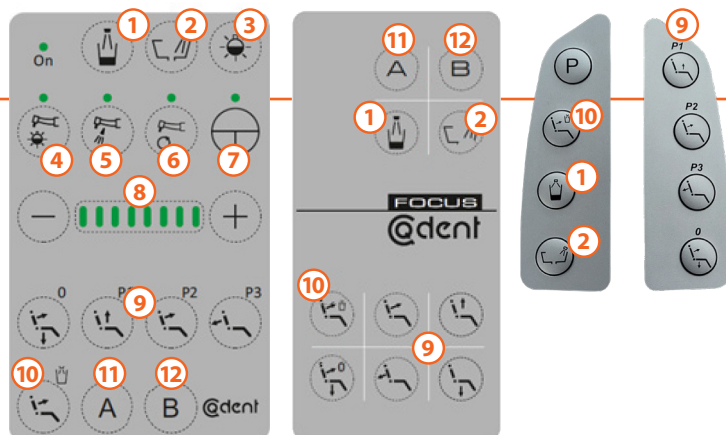

### Instellen spray

- 1 Activeer het betreffende instrument door de zweep naar voren te trekken.
- 2 Druk op de toets **12** om de hoeveelheid spraywater in te stellen, 1x = 25%, 4x = 100%
- 3 Draai aan de knop onder het betreffende instrument, aan de onderkant van de unit, om de hoeveelheid spraylucht in te stellen.

### Instellen max toerental Airrotor

- Draai aan de zwarte knop rechtsachter aan de onderkant van de unit, om de toerental te regelen.

### Instellen Meerfunctiespuit

- Draai aan de knop onder het betreffende instrument, aan de onderkant van de unit, om de hoeveelheid spraylucht in te stellen.

### Instellen spittoon & glasvuller

- 1 Druk op de glasvuller **1** of de rondspoeling toets **2** en houd deze ingedrukt tot de gewenste hoeveelheid of tijdsduur
- 2 Laat nu de toets los
- 3 De instelling is automatisch opgeslagen (werkt alleen wanneer de toets langer dan 3 seconden wordt ingedrukt)

### Instellen Scaler (Uitsluitend Satelec)

- Draai aan de knop rechtsvoor aan de onderkant van de unit, om de functie Endo/Perio/Scaling te selecteren.



#### LET OP

Wanneer het voetpedaal is aangesloten met de stoelkabel, kunnen bepaalde functies niet gebruikt worden.

- 1 Knop Chipblow is uitgeschakeld 2 Knop Spray is uitgeschakeld



## Stoelbediening

Zowel mogelijk via voetpedaal als bedieningspaneel

- 1 Kort indrukken activeert één van de vier geprogrammeerde stoelposities.
- 2 Lang indrukken drukken bepaald handmatig de stoelpositie.

## Stoelprogrammering

- 1 Zet de stoel in de gewenste positie.
- 2 Houdt de zwarte knop aan de onderkant van de rugleuning ingedrukt.
- 3 Druk nu op één van de vier stoelbedieningsknoppen.
- 4 De stoel bevestigt de instelling met een pieptoon.

## Doorspoelen instrumentslangen

Kort programma tussen de behandeling, lang programma aan het begin & einde van de werkdag

- 1 verwijder alle hand en hoekstukken
- 2 Plaats de spoeeenheid in het spittoon of emmer
- 3 Plaats **alle** instrumentslangen behalve de meerfunctiespuit in de spoeeenheid
- 4 Houd toets **5** ingedrukt tot er 2 korte pieptonen geweest zijn en het spoelprogramma begint
- 5 Laat de slangen gedurende **20 tot 40 seconden** doorspoelen
- 6 Stop nu het spoelprogramma door toets **5** te selecteren.



**Let op:** Het doorspoelen van de meerfunctiespuit dient handmatig te gebeuren

**Let op:** het spoelprogramma stopt niet automatisch. Blijf dus te alle tijden bij de unit bij het uitvoeren van dit programma

## Reinigen afzuigsysteem (middag en avond)

- 1 Druk twee maal op de dispenserpomp (= 6 ml concentraat)
- 2 Vul het reservoir met water tot aan de niveaustreep (600 ml water)
- 3 Zet de kleine afzuiger tegen opening nr. 1 totdat er geen vloeistof meer wordt opgezogen (200 ml)
- 4 Zet de grote afzuiger tegen opening nr. 2 totdat er geen vloeistof meer wordt opgezogen (200 ml)
- 5 Giet de resterende vloeistof in het spittoon



Voor spoelen tussen de behandelingen door slaat u stap 1 over.

## Reinigen afzuigfilter (dagelijks)

- 1 Haal beide afzuigers uit de houders gedurende 5 seconden en plaats deze vervolgens weer terug
- 2 Verwijder het filter uit de behuizing door deze naar u toe te trekken
- 3 Reinig het filter grondig en plaats alles terug



De locatie van het filter verschilt per model

## Reinigen filter spittoonklep (wekelijks)

- 1 Activeer Dürr leegzuiging d.m.v. gele bedieningsknop
- 2 Verwijder het filterhuis d.m.v. een draaibeweging
- 3 Reinig het filter grondig
- 4 Plaats alles terug



De locatie van het filter verschilt per model

## Reinigen spittoon (dagelijks)

- 1 Keer de doseerfles ondersteboven en knijp één maal
- 2 Reinig het spittoon grondig met de geïntegreerde borstel
- 3 Activeer de spoelfunctie van het spittoon **2**



## Metasys spraywater desinfectie

- 1 Zet de schakelaar op de unit om, op deze manier haalt u de druk van de fles
- 2 Koppel met een draaibeweging de fles af
- 3 Gebruik Metasys GREEN&CLEAN WK zoals omschreven op het Metasys instructieblad
- 4 Vul de fles met (demi)water
- 5 Sluit de fles weer aan en zet de schakelaar om



- Bij elke flesvulling en standaard ontsmetting: **24 ml** GREEN&CLEAN WK gebruiken
- Bij elke Shockbehandeling: **48 ml** GREEN&CLEAN WK gebruiken

## Verbruiksartikelen [bestel op www.e-dental.nl](http://www.e-dental.nl)

### Afzuiging

- 105-7600A01000 Dürr Nevelafzuiger met schuifje
- 105-7600A01004 Dürr Verloop 16mm voor Nevel Afzuiger
- 105-7600A02000 Dürr speekselzuiger met schuifje
- 105-7600A03000 Dürr kogelgewricht voor Nevelafzuiger
- 105-72504100 Dürr Filter geel

### Instrumenten

- 055-RL348G- Luzzani Minimate gray nozzle ( PN 348 )
- 055-RT223 Minimate Steel nozzle cover ( PN 441 )
- 020-0113528100 Bien Air MC3, MC2, Aqoi , O-RING INTRA
- 125-200150 Riskontrol adapter RVS Luzzani NEW
- 125-201664 Satelec Riskontrol Classic Tips "White" 250 stuks

### Behandelstoel

- 210-1095135 Tecnodent Linda3 & 2009 new footrest protection

### Hygiëne

- 035-60030095 Green & Clean MT/MK refill kit I ( 2 x 70 large wipes )
- 035-60030111 Green & Clean SK intro kit ( 6 x 750 ml fles + 2 x foamer )
- 035-60030002 Green & Clean SD refill kit 1 ( 6 x 750 ml fles )
- 035-60010203 Green & Clean M2 refill kit II ( 2 x 500 ml flessen )
- 035-40200001BL Dispenser for Green & Clean M2
- 035-60020009 Green & Clean MB replacement fles met brush, empty
- 035-60020004 Green & Clean MB refill kit 2 ( 4 x 500 ml )
- 035-60040100-1 Green & Clean WK refill kit 1 ( 4 x 750 ml )
- 035-40200020 Green&Clean WK Doseerkit

# Productadvies t.b.v. reiniging van de complete unit

---

