

Qdent S-60 Stand Alone Unit



Legen vuil watertank

- 1 Haal de vuil water tank uit de unit.
- 2 Klik de rubbertjes **1** los.
- 3 Verwijder de deksel van de tank.
- 4 Leeg de tank.
- 5 Plaats het geheel weer terug.



Vullen vers watertank Spittoon

- 1 Zet de drukschakelaar **1** op OFF en wacht tot de druk van de fles is.
- 2 Haal de vers water tank uit de unit.
- 3 Draai het drukventiel **2** los.
- 4 Vul de fles met vers water.
- 5 Plaats het geheel weer terug.
- 6 Zet de schakelaar **1** op ON.



Reinigen Filter (wekelijks)

Verwijder het filter uit de behuizing door deze met draaiende beweging los te trekken. Reinig vervolgens het filter grondig en plaats terug.

