

Instructiekaart

Flessensysteem



Deze instructie is geschreven voor **Chirana behandelunits** met 0,75 liter of 2 liter fles.

Basis regels gebruik fles

- 1 Spoel de instrumenten conform WIP richtlijnen.
- 2 Voeg bij elke vulling Metasys WK toe aan de inhoud van de fles.
- 3 Leeg aan het einde van de werkdag altijd de fles en droog deze omgekeerd.
- 4 Zet aan het einde van de werkweek of bij langdurige stilstand altijd de leidingen volledig droog.
- 5 Voer wekelijks een shock behandeling uit.

U heeft verhoogde bacteriologische waarden.

- 1 Voer een dagelijkse shock behandeling uit gedurende 5 dagen.
- 2 Voer wederom een meting uit.
- 3 Herhaal dit proces tot de bacteriologische waarden acceptabel zijn.


Doorspoelen instrumentslangen

Kort programma tussen de behandelingen,
lang programma aan het begin & einde van de werkdag.


- 1 Plaats de spoleenheid in het spittoon of emmer.
- 2 Plaats de instrumentslangen (zonder instrumenten) in de spoleenheid (minimaal 2).
- 3 Druk op de doorspoeltoets **A** op het instrumentenpaneel
 - 1 seconde ingedrukt houden activeert het **korte** programma.
 - 4 seconden ingedrukt houden activeert het **lange** programma.

Let op:

Het doorspoelen van de meerfunctiespuit dient **handmatig** te gebeuren gedurende minimaal 30 seconden bij het korte en minimaal 60 seconden bij het lange programma.

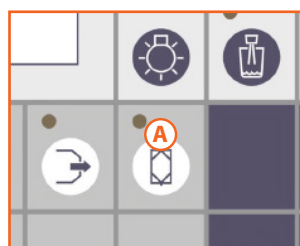

Toetsenpaneel

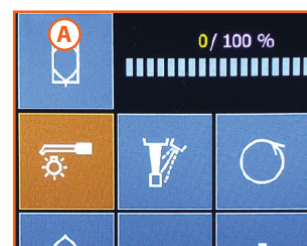

Touchscreen

Flessen vullen

- 1 Zet de schakelaar op de unit om, op deze manier haalt u de druk van de fles.
- 2 Koppel met een draaibeweging de fles af.
- 3 Vul met **Metasys Green & Clean WK**.
 - 10 ml voor een **0,75 liter** fles.
 - 24 ml voor een **2 liter** fles.
- 4 Vul de fles met (demi)water.
- 5 Sluit de fles weer aan en zet de schakelaar om.



Instructiekaart Flessensysteem



Leidingen droogzetten

- 1 Haal de luchtdruk van de fles.
- 2 Haal de fles van de unit en giet deze helemaal leeg.
- 3 Plaats de fles terug op de unit en zet onder druk.
- 4 Spuit nu de functiespuit helemaal leeg tot er 10 seconden enkel nog lucht uit komt **(met het waterknopje!)**.
- 5 Activeer het spoelprogramma voor de overige instrumenten tot er 10 seconden enkel nog lucht uit komt.

Shock behandeling

- 1 Zet de leidingen droog.
- 2 Haal de luchtdruk van de fles en haal de fles van de unit.
- 3 Vul de fles met **Metasys Green & Clean WK**
 - **20 ml** voor een **0,75 liter** fles
 - **48 ml** voor een **2 liter** flesen vul verder met (demi)water.
Het is ook mogelijk met kleinere hoeveelheden
 - **10 ml** voor een **0,75 liter** fles, **50%** gevuld
 - **24 ml** voor een **2 liter** fles, **50%** gevuld
- 4 Plaats de fles terug op de unit en zet onder druk.
- 5 Spuit nu met de functiespuit tot er **5** seconden lang een goede spray is.
- 6 Activeer nu het **korte** spoelprogramma.
- 7 Wacht tot het spoelprogramma klaar is.
- 8 De unit kan nu eventueel uit gezet worden. Laat de oplossing **minimaal 1 uur** inwerken en **maximaal 12 uur**.
- 9 Leeg nu de fles en vul met normaal (demi) water.
- 10 Activeer nu het lange spoelprogramma



Metasys Green & Clean WK producten:

- | | |
|--|--|
| 1 Green & Clean WK doseerkit (voor 750 ml. fles)
Bestelnummer: 035-40200020 | 2 Green & Clean WK (4 x 750 ml.)
Bestelnummer: 035-60040100-1 |
|--|--|



Het complete assortiment aan onderhoudsproducten van Metasys kunt u bestellen via onze webshop: www.e-dental.nl