

Instructiekaart

Flessensysteem



Deze instructie is geschreven voor Qdent S-50 / S-60 & Galit dental units met 2 liter fles.

Basis regels gebruik fles


- 1 Spoel de instrumenten conform WIP richtlijnen.
- 2 Voeg bij elke vulling Metasys WK toe aan de inhoud van de fles.
- 3 Leeg aan het einde van de werkdag altijd de fles en droog deze omgekeerd.
- 4 Zet aan het einde van de werkweek of bij langdurige stilstand altijd de leidingen volledig droog.
- 5 Voer wekelijks een shock behandeling uit.

U heeft verhoogde bacteriologische waarden.

- 1 Voer een dagelijkse shock behandeling uit gedurende 5 dagen.
- 2 Voer wederom een meting uit.
- 3 Herhaal dit proces tot de bacteriologische waarden acceptabel zijn.

Doorspoelen instrumentslangen

- 1 Verwijder alle hand en hoekstukken.
- 2 Plaats de spoleenheid in het spittoon of emmer.
- 3 Plaats **alle** instrumentslangen behalve de meerfunctiespuit in de spoleenheid.
- 4 Houd toets **5** ingedrukt tot er 2 korte pieptonen geweest zijn en het spoelprogramma begint.
- 5 Laat de slangen gedurende **20 tot 40 seconden** doorspoelen.
- 6 Stop nu het spoelprogramma door toets **5** te selecteren.

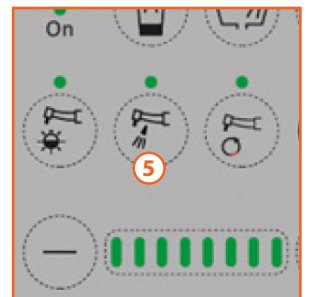

Let op: Het doorspoelen van de meerfunctiespuit dient handmatig te gebeuren.

Let op: Het spoelprogramma stopt niet automatisch. Blijf dus te alle tijden bij de unit bij het uitvoeren van dit programma.

Flessen vullen

- 1 Zet de schakelaar op de unit om, op deze manier haalt u de druk van de fles.
- 2 Koppel met een draaibeweging de fles af.
- 3 Vul met **24 ml. Metasys Green & Clean WK**.
- 4 Vul de fles met (demi)water.
- 5 Sluit de fles weer aan en zet de schakelaar om.



Instructiekaart

Flessensysteem



Leidingen droogzetten

- 1 Haal de luchtdruk van de fles.
- 2 Haal de fles van de unit en giet deze helemaal leeg.
- 3 Plaats de fles terug op de unit en zet onder druk.
- 4 Spuit nu de functiespuit helemaal leeg tot er 10 seconden enkel nog lucht uit komt **(met het waterknopje!)**.
- 5 Activeer het spoelprogramma voor de overige instrumenten tot er 10 seconden enkel nog lucht uit komt.

Shock behandeling

- 1 Zet de leidingen droog.
- 2 Haal de luchtdruk van de fles en haal de fles van de unit.
- 3 Vul de fles met **48 ml. Metasys Green & Clean WK** en vul verder met (demi)water (het is natuurlijk ook mogelijk op 24ml WK te gebruiken i.c.m. 50% flesvulling of 12ml WK met 25% flesvulling).
- 4 Plaats de fles terug op de unit en zet onder druk.
- 5 Spuit nu met de functiespuit tot er 2 seconden lang een goede spray is.
- 6 Activeer nu het spoelprogramma en wacht tot er 2 seconden uit alle instrumenten vloeistof komt.
- 7 De unit kan nu eventueel uit gezet worden. Laat de oplossing minimaal 1 uur inwerken en maximaal 12 uur.



Metasys Green & Clean WK producten:

- | | |
|---|---|
| 1 Green & Clean WK doseerkit (voor 750 ml. fles)
Bestelnummer: 035-40200020 | 2 Green & Clean WK (4 x 750 ml.)
Bestelnummer: 035-60040100-1 |
|---|---|



Het complete assortiment aan onderhoudsproducten van Metasys kunt u bestellen via onze webshop: www.e-dental.nl