

Bedieningspaneel Instrumentbrug

- | | |
|---|--|
| 1 Selectie gebruiker 1 t/m 4 | 8 Waarde verhogen / verlagen |
| 2 Bediening operatielamp | 9 Spray aan / uit |
| 3 Activeren rondspoeling | 10 Omkeren draairichting micromotor |
| 4 Activeren drinkglasvuller | 11 Voetbediening aan/uit functie |
| 5 Activeren deuropener / assistentiebel | 12 Stoelbediening |
| 6 Snelheid / Intensiteit indicator | 13 Programmeertoets |
| 7 Activeren desinfectieprogramma | 14 Vergrendeltoets (aan/uit >> 3 sec.) |



Bedieningspaneel afzuigarm

- 1 Bediening operatielamp
- 2 Activeren rondspoeling
- 3 Activeren drinkglasvuller
- 4 Stoelbediening
- 5 Leidingwater
- 6 Flessenwater







Interactief voetpedaal

- 1 Activeren instrument
- 2 Chip-Blow functie
- 3 Spray aan/uit
- 4 Stoelbediening
- 5 Aansluiting oplaadkabel
- 6 Laadindicator
- 7 Programmeerbare knop 1
- 8 Programmeerbare knop 2



Scan de QR
voor onze complete
instructiedocumentatie



	Korte selectie	Auto functies **	Lange selectie
	Uitstapstand	Activering rondspoeling	Stoel naar beneden
	Behandelstand	Operatielamp aan	Stoel omhoog
	Behandelstand	Operatielamp aan	Rugleuning naar beneden
	Spoelstand 1e selectie >> rugleuning omhoog 2e selectie >> rugleuning terug	>> operatielamp uit >> rondspoeling >> operatielamp aan	Rugleuning omhoog

** Auto functie dient ingesteld te worden

Bedienen operatielamp

- 1 x selecteren: in- of uitschakelen
- 2 x selecteren: wisselen tussen normaal en composietstand (enkel bij Faro EVA)
- Ingedrukt houden om de intensiteit aan te passen



Programmeren behandelstoel



- 1 Selecteer de programmeer toets
- 2 Druk op één van de stoelbedieingstoetsen en houdt deze ingedrukt tot er een pieptoon klinkt.




Let op:

Positie **1** moet altijd uitstap zijn, positie **4** spoelstand

Vullen desinfectiesysteem

- 1 Verwijder de zijkap van de behandelunit
- 2 Draai de flessenhouder zodat je er goed bij kunt
- 3 Zet de schakelaar op  en wacht totdat alle lucht uit het systeem gelopen is
- 4 Draai nu de fles los en vul deze met de juiste dosering water/desinfectants
- 5 Plaats de fles weer terug en zet schakelaar op 
- 6 Plaats de zijkap weer terug

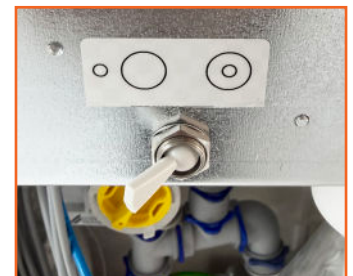

- ▶ Wanneer de fles leeg is klinkt een acoustisch signaal

Let op:

Wanneer u gebruik maakt van **Metasys WK** kunt u de instructiekaart downloaden op onze website.

Instellen spittoon & glasvuller

- 1 Druk op de drinkglasvuller- of de rondspoeling toets en houd deze ingedrukt
- 2 Wanneer de gewenste hoeveelheid is bereikt laat u de toets los **(een pieptoon volgt)**
De instelling is automatisch opgeslagen
De tijd kan ingesteld worden tussen 3 en 60 seconden



Instellen spray

- 1 Activeer het betreffende instrument door de zweep naar voren te trekken
- 2 Selecteer de programmeertoets
- 3 Houd de spray aan / uit toets 3 seconden ingedrukt **(een pieptoon volgt)**
- 4 Druk op + of - om bij te stellen
- 5 Selecteer opnieuw de programmeertoets om op te slaan



Instellen functieknoppen voetpedaal

Op elke functieknop kunnen twee acties ingesteld worden. Een actie met instrumenten in rustpositie en een actie met een instrument geselecteerd.

De volgende onderdelen zijn in te stellen:

Operatielamp, drinkglasvuller, rondspoeling, assistentenbel, draairichting micromotor, spray.

- 1 Selecteer de programmeertoets
- 2 Houdt de te programmeren functieknop ingedrukt gedurende 3 seconde **(een piepton volgt)**
- 3 Kijk op het bedieningspaneel van de instrumentbrug welke functie nu actief is
- 4 Selecteer eventueel een andere functie
- 5 Selecteer opnieuw de programmeertoets om op te slaan



Instellen afzuigstop

Met deze functie kunt u de afzuigfunctie stoppen of activeren door op de vloerplaat te drukken met uw voet.

- 1 Selecteer de programmeertoets
- 2 Druk de vloerplaat gedurende 3 seconden in **(een piepton volgt)**
 - ▶ Selecteer de voetbediening aan/uit toets voor het activeren van de functie voor **alle** afzuigers
 - ▶ Haal 1 specifieke zuiger uit de houder en druk op **+** om **1 specifieke zuiger** in te schakelen
 - ▶ Selecteer **-** om de functie te deactiveren
- 3 Selecteer opnieuw de programmeertoets om op te slaan



Instellen automatische rondspoeling & operatielamp bij stoelposities

- 1 Selecteer de programmeertoets
- 2 Selecteer de vergrendeltoets
- 3 Selecteer de rondspoeling toets
 - Wanneer deze oplicht is de functie actief, selecteer nogmaals om te deactiveren
- 4 Selecteer de operatielamp toets
 - Wanneer deze oplicht is de functie actief, selecteer nogmaals om te deactiveren
- 5 Selecteer opnieuw de programmeertoets om op te slaan



Instellen Variabele of vaste snelheid/intensiteit

- 1 Activeer het betreffende instrument door de zweep naar voren te trekken
- 2 Selecteer de Voetbediening aan/uit functie om van functie te wisselen
 - ▶ Wanneer het led-lampje **niet** brand is de **variabele** snelheid ingesteld
 - ▶ Wanneer het led-lampje **wel** brand is de **vaste** snelheid ingesteld



Let op:

Enkel voor micromotor en scaler

Instellen maximale snelheid/intensiteit

- 1 Activeer het betreffende instrument door de zweep naar voren te trekken
- 2 De Snelheid / Intensiteit indicator geeft de ingestelde waarde aan
- 3 Pas de intensiteit aan naar de gewenste waarde door **+** of **-** te selecteren



Let op:

Enkel voor micromotor en scaler

Instellen Verschillende gebruikers


Selecteer gebruiker selectie om te wisselen tussen gebruiker 1 t/m 4.



Voor iedere gebruiker zijn de volgende functies in te stellen:

- Stoelprogramming
- Functieknoppen voetpedaal
- Instrument instellingen
- Automatisch operatielamp en rondspoeling

- 1 Haal de kap van de unit af
- 2 Haal beide afzuigers uit de houders gedurende 5 seconden en plaats deze vervolgens weer terug
- 3 Verwijder het filter uit de behuizing door deze naar u toe te trekken
- 4 Reinig het filter grondig
- 5 Plaats alles terug

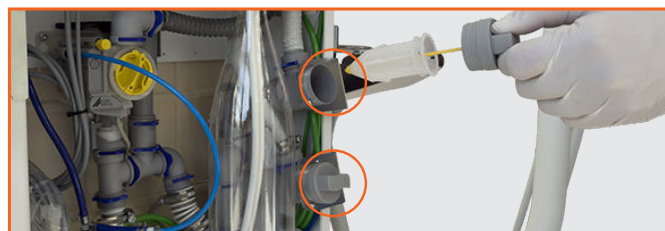

Reinigen filter spittoonklep (wekelijks)

- 1 Haal de kap van de unit af
- 2 Druk gedurende 3 seconden op de gele knop bij het filter
- 3 Verwijder het filterhuis d.m.v. een draibeweging
- 4 Reinig het filter grondig
- 5 Plaats alles terug



Reinigen afzuigstelsysteem met gebruik van Metasys M2 (middag en avond)

- 1 Druk twee maal op de dispenser pomp (= 6 ml concentraat)
- 2 Vul het reservoir met water tot aan de niveaustreep (600 ml water)
- 3 Zet de kleine afzuiger tegen opening nr. 1 totdat er geen vloeistof meer wordt opgezogen (200 ml)
- 4 Zet de grote afzuiger tegen opening nr. 2 totdat er geen vloeistof meer wordt opgezogen (200 ml)
- 5 Giet de resterende vloeistof in het spittoon

Let op:

De volledige **Metasys M2** instructiekaart kunt u downloaden op onze website.

Doorspoelen instrumentslangen

- 1 Selecteer op het assistent bedieningspaneel of er gespoeld wordt vanaf leidingwater of vanaf het ingebouwde flessensysteem
 - Vul bij gebruik van het flessensysteem de fles met de juiste hoeveelheid desinfectants en water
- 2 Plaats de spoleenheid in het spittoon of emmer
- 3 Plaats de instrumentslangen (zonder instrumenten) in de spoleenheid.
- 4 Selecteer het desinfectieprogramma
 - ▶ Selecteer **-** voor het korte programma (3 sec) na iedere behandeling.
Het korte programma vervangt enkel het water in de instrumentslang
 - ▶ Selecteer **+** voor het lange programma (30 sec) na iedere werkdag.
Het lange programma vervangt al het water van aansluiting tot instrument
- 5 Activeer het programma met de programmeertoets en wacht tot het afgerond is.



Let op:

Het doorspoelen van de meerfunctiespuit dient handmatig te gebeuren.