


# Instructiekaart Chirana Connect

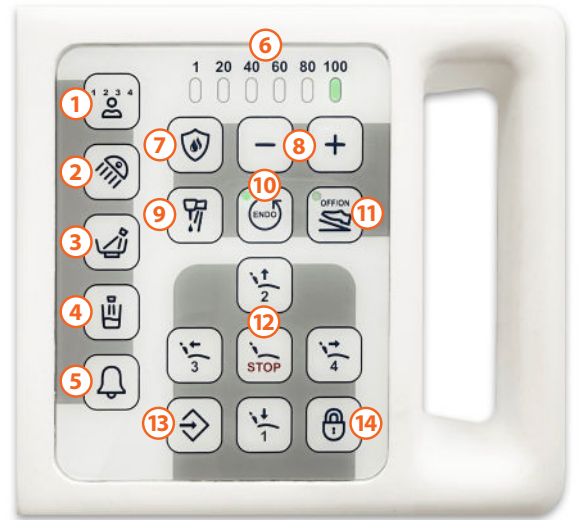

## Bedieningspaneel Instrumentbrug

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 Selectie gebruiker 1 t/m 4            | 8 Waarde verhogen / verlagen        |
| 2 Bediening operatielamp                | 9 Spray aan / uit                   |
| 3 Activeren rondspoeling                | 10 Omkeren draairichting micromotor |
| 4 Activeren drinkglasvuller             | 11 Voetbediening aan/uit functie    |
| 5 Activeren deuropener / assistentiebel | 12 Stoelbediening                   |
| 6 Snelheid / Intensiteit indicator      | 13 Programmeertoets                 |
| 7 Activeren desinfectieprogramma        | 14 Vergrendeltoets                  |



## Bedieningspaneel afzuigarm

- 1 Bediening operatielamp
- 2 Activeren rondspoeling
- 3 Activeren drinkglasvuller
- 4 Stoelbediening
- 5 Leidingwater
- 6 Flessenwater







## Interactief voetpedaal

- 1 Activeren instrument
- 2 Chip-Blow functie
- 3 Spray aan/uit
- 4 Stoelbediening
- 5 Aansluiting oplaadkabel
- 6 Laadindicator
- 7 Programmeerbare knop 1
- 8 Programmeerbare knop 2



Scan de QR  
voor onze complete  
instructiedocumentatie

## Bedienen behandelstoel

	Korte selectie	Auto functies **	Lange selectie
	Uitstapstand	Activering rondspoeling	Stoel naar beneden
	Behandelstand	Operatielamp aan	Stoel omhoog
	Behandelstand	Operatielamp aan	Rugleuning naar beneden
	Spoelstand 1e selectie >> rugleuning omhoog 2e selectie >> rugleuning terug	1e selectie >> operatielamp uit 2e selectie >> operatielamp aan	Rugleuning omhoog

\*\* Auto functie dient ingesteld te worden

## Bedienen operatielamp

- 1 x selecteren: in- of uitschakelen
- 2 x selecteren: wisselen tussen normaal en composietstand (enkel bij Faro EVA)
- Ingedrukt houden om de intensiteit aan te passen



## Programmeren behandelstoel



- 1 Selecteer de programmeer toets
- 2 Druk op één van de stoelbedieningstoetsen en houdt deze ingedrukt tot er een pieptoon klinkt.




### Let op:

Positie **1** moet altijd uitstap zijn, positie **4** spoelstand

## Vullen desinfectiesysteem

- 1 Verwijder de zijkap van de behandelunit
- 2 Draai de flessenhouder zodat je er goed bij kunt
- 3 Zet de schakelaar op  en wacht totdat alle lucht uit het systeem gelopen is
- 4 Draai nu de fles los en vul deze met de juiste dosering water/desinfectants
- 5 Plaats de fles weer terug en zet schakelaar op 
- 6 Plaats de zijkap weer terug

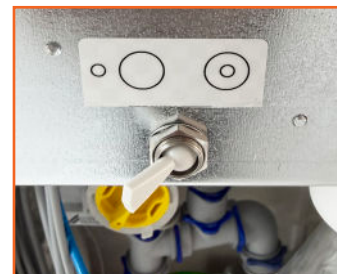

### Let op:

Wanneer u gebruik maakt van **Metasys WK** kunt u de instructiekaart downloaden op onze website.

## Instellen spittoon & glasvuller

- 1 Druk op de drinkglasvuller- of de rondspoeling toets en houd deze ingedrukt
- 2 Wanneer de gewenste hoeveelheid is bereikt laat u de toets los **(een pieptoon volgt)**  
De instelling is automatisch opgeslagen  
De tijd kan ingesteld worden tussen 3 en 60 seconden



## Instellen spray

- 1 Activeer het betreffende instrument door de zweep naar voren te trekken
- 2 Selecteer de programmeertoets
- 3 Houd de spray aan / uit toets 3 seconden ingedrukt **(een pieptoon volgt)**
- 4 Druk op + of - om bij te stellen
- 5 Selecteer opnieuw de programmeertoets om op te slaan



## Instellen

### functieknoppen voetpedaal

**Op elke functieknop kunnen twee acties ingesteld worden. Een actie met instrumenten in rustpositie en een actie met een instrument geselecteerd.**

#### De volgende onderdelen zijn in te stellen:

Operatielamp, drinkglasvuller, rondspoeling, assistentenbel, draairichting micromotor, spray.

- 1 Selecteer de programmeertoets
- 2 Houdt de te programmeren functieknop ingedrukt gedurende 3 seconde **(een piepton volgt)**
- 3 Kijk op het bedieningspaneel van de instrumentbrug welke functie nu actief is
- 4 Selecteer eventueel een andere functie
- 5 Selecteer opnieuw de programmeertoets om op te slaan



## Instellen

### afzuigstop

**Met deze functie kunt u de afzuigfunctie stoppen of activeren door op de vloerplaat te drukken met uw voet.**

- 1 Selecteer de programmeertoets
- 2 Druk de vloerplaat gedurende 3 seconden in **(een piepton volgt)**
  - ▶ Selecteer de voetbediening aan/uit toets voor het activeren van de functie voor **alle** afzuigers
  - ▶ Haal 1 specifieke zuiger uit de houder en druk op **+** om **1 specifieke zuiger** in te schakelen
  - ▶ Selecteer **-** om de functie te deactiveren
- 3 Selecteer opnieuw de programmeertoets om op te slaan



## Instellen

### automatische rondspoeling & operatielamp bij stoelposities

- 1 Selecteer de programmeertoets
- 2 Selecteer de vergrendeltoets
- 3 Selecteer de rondspoeling toets
  - Wanneer deze oplicht is de functie actief, selecteer nogmaals om te deactiveren
- 4 Selecteer de operatielamp toets
  - Wanneer deze oplicht is de functie actief, selecteer nogmaals om te deactiveren
- 5 Selecteer opnieuw de programmeertoets om op te slaan



## Instellen

### Variabele of vaste snelheid/intensiteit

- 1 Activeer het betreffende instrument door de zweep naar voren te trekken
- 2 Selecteer de Voetbediening aan/uit functie om van functie te wisselen
  - ▶ Wanneer het led-lampje **niet** brand is de **variabele** snelheid ingesteld
  - ▶ Wanneer het led-lampje **wel** brand is de **vaste** snelheid ingesteld



#### Let op:

Enkel voor micromotor en scaler

## Instellen

### maximale snelheid/intensiteit

- 1 Activeer het betreffende instrument door de zweep naar voren te trekken
- 2 De Snelheid / Intensiteit indicator geeft de ingestelde waarde aan
- 3 Pas de intensiteit aan naar de gewenste waarde door **+** of **-** te selecteren



#### Let op:

Enkel voor micromotor en scaler

## Instellen

### Verschillende gebruikers

Selecteer gebruiker selectie om te wisselen tussen gebruiker 1 t/m 4.




Voor iedere gebruiker zijn de volgende functies in te stellen:

- Stoelprogrammering
- Functieknoppen voetpedaal
- Instrument instellingen
- Automatisch operatielamp en rondspoeling

## Reinigen afzuigfilter (dagelijks)

- 1 Haal de kap van de unit af
- 2 Haal beide afzuigers uit de houders gedurende 5 seconden en plaats deze vervolgens weer terug
- 3 Verwijder het filter uit de behuizing door deze naar u toe te trekken
- 4 Reinig het filter grondig
- 5 Plaats alles terug

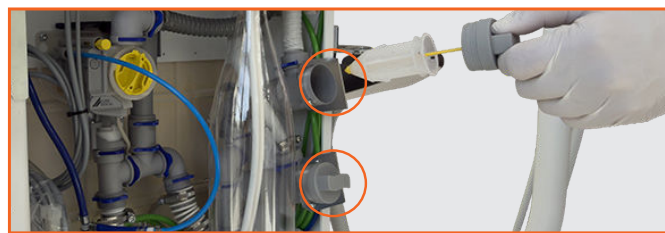

## Reinigen filter spittoonklep (wekelijks)

- 1 Haal de kap van de unit af
- 2 Druk gedurende 3 seconden op de gele knop bij het filter
- 3 Verwijder het filterhuis d.m.v. een draibeweging
- 4 Reinig het filter grondig
- 5 Plaats alles terug



## Reinigen afzuigstelsysteem met gebruik van Metasys M2 (middag en avond)

- 1 Druk twee maal op de dispenser pomp (= 6 ml concentraat)
- 2 Vul het reservoir met water tot aan de niveaustreep (600 ml water)
- 3 Zet de kleine afzuiger tegen opening nr. 1 totdat er geen vloeistof meer wordt opgezogen (200 ml)
- 4 Zet de grote afzuiger tegen opening nr. 2 totdat er geen vloeistof meer wordt opgezogen (200 ml)
- 5 Giet de resterende vloeistof in het spittoon

### Let op:

De volledige **Metasys M2** instructiekaart kunt u downloaden op onze website.

## Doorspoelen instrumentslangen

- 1 Selecteer op het assistent bedieningspaneel of er gespoeld wordt vanaf leidingwater of vanaf het ingebouwde flessensysteem
  - Vul bij gebruik van het flessensysteem de fles met de juiste hoeveelheid desinfectants en water
- 2 Plaats de spoleenheid in het spittoon of emmer
- 3 Plaats de instrumentslangen (zonder instrumenten) in de spoleenheid.
- 4 Selecteer het desinfectieprogramma
  - ▶ Selecteer - voor het korte programma (3 sec) na iedere behandeling.  
*Het korte programma vervangt enkel het water in de instrumentslang*
  - ▶ Selecteer + voor het lange programma (30 sec) na iedere werkdag.  
*Het lange programma vervangt al het water van aansluiting tot instrument*
- 5 Activeer het programma met de programmeertoets en wacht tot het afgerond is.



### Let op:

Het doorspoelen van de meerfunctiespuit dient handmatig te gebeuren.