

GREEN&CLEAN M2

Toepassing



1. Druk het pompje van de dispenser tweemaal in (= 6 ml concentraat)



2. Vul de container met koud water tot aan de indicator (=600 ml van 1% verdunning)



3. Zet de kleine afzuigslang tegen opening nr. 1 totdat de lucht is opgezogen (200 ml)



4. Zet de grote afzuigslang tegen opening nr. 2 totdat de lucht is opgezogen (200 ml)



5. Giet de resterende oplossing in de spittoon (200 ml)



6. Houd de toepassingstijd van 60 min. aan en spoel vervolgens met koud water

Antischuimconcentraat met dubbele actieve werking voor de desinfectie en ontgeuring van afzuigsystemen en amalgaamafscheiders

Kenmerken

dubbele werking (rood/groen) tegen weerstand bacteriedodend, tuberculosebacteriedodend, schimmeldodend (*C. albicans*), HBV/HIV/HCV
 zeer geconcentreerd en eenvoudig te doseren
 uitstekend ontgeurings- en eiwitoplossend vermogen
 actieve ontschuiming
 getest conform EN-standaarden en VAH-richtlijnen

Aanbevelingen voor gebruik

2 x dagelijks (,s middags/'s avonds) en na lange chirurgische behandelingen
 Reinig het afzuigstelsel na iedere behandeling met koud water
 Verander van kleur na 83 toepassingen (1 fles)
 Draag beschermende handschoenen tijdens het desinfecteren
 Volg de doseeraanwijzingen en aanbevolen toepassingstijden nauwkeurig op
 Gebruik de mengoplossing onmiddellijk
 Neem de gebruiksinstructies van de fabrikant in acht



De dispenser opnieuw vullen



Verwijder de doseerunit van de dispenser en verwijder de kop van het pompje door deze naar links (tegen de wijzers van de klok) in te draaien



Schenk de nieuwe GREEN&CLEAN M2 in de container (500 ml)



Bevestig de kop weer op de container door hem naar rechts te draaien (met de wijzers van de klok mee) en plaats de doseerunit weer terug in de dispenser

edental

METASYS