

GREEN&CLEAN WK

Toepassing met het doseerhulpmiddel



1. Draag handschoenen terwijl u het doseerhulpmiddel uit de verpakking verwijdert



2. Verwijder de garantiestrip (raak het opzuigbuisje niet aan)



3. Plaats het opzuigbuisje en schroef het doseerhulpmiddel stevig vast op de GREEN&CLEAN WK-fles*



4. Open de gele dop en druk zacht om te doseren (zie onderstaande doseertabel)



5. Schenk de GREEN&CLEAN WK in de waterfles en sluit deze weer aan op de behandelunit



6. Sluit de dop onmiddellijk na ieder gebruik om de inhoud tegen besmetting te beschermen

Oplossing met 2% waterstofperoxide voor de zuivering van proceswater.

Kenmerken breed spectrum van werkzaamheid, met langdurig effect
 preventie van biofilm
 beschermt hand- en hoekstukken
 CE 0044

Aanbevelingen voor gebruik draag beschermende handschoenen en een bril
 voeg voor een continue ontsmetting GREEN&CLEAN WK toe telkens wanneer de waterfles opnieuw wordt gevuld (zie onderstaande doseertabel)
 als de GREEN&CLEAN WK-fles leeg is, verwijdert u het doseerhulpmiddel uit de lege fles en plaatst u het op de nieuwe fles
 vervang het doseerhulpmiddel iedere zes maanden en in het geval van zware besmetting is het doseerhulpmiddel niet geschikt om opnieuw te worden gebruikt
 *Het doseerhulpmiddel is alleen compatibel met de 750 ml GREEN&CLEAN WK-flessen - gebruik een maatbeker bij gebruik van 1 liter GREEN&CLEAN WK-flessen

Doseertabel

Water	GREEN&CLEAN WK	
	Standaard ontsmetting	Shockbehandeling**
0,5 l	6 ml	12 ml
1,0 l	12 ml	24 ml
2,0 l	24 ml	48 ml
3,0 l	36 ml	72 ml

**toepassingstijd voor shockbehandeling: min. 1 uur, max. 12 uur (buisjes moeten volledig zijn ondergedompeld gedurende de volledige duur van de shockbehandeling)

